

## CE – Dichiarazione di conformità

## CE – Declaration of Conformity

Prodotto/product details	CE		
Prodotto/product name	PERFETTO AP		
Identificazione/type	<p><b>Varianti</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 2px;">VARIANTE UNICA</td> <td style="padding: 2px;">           Materasso cinque strati con uno strato di base alto 2cm di poliuretano schiumato ad acqua ad alta portanza (21 kg/mc) di produzione Lareg2 Srl con codice 21SD, accoppiato a uno strato di feltro prodotto da Manifattura Maiano da 1cm, accoppiato a un box di molle Bonnel ad alta densità (650 molle nella misura matrimoniale) alto 14cm di produzione Antecon Srl, accoppiato a uno strato di feltro prodotto da Manifattura Maiano da 1cm, infine accoppiata a uno strato alto 2cm di poliuretano schiumato ad acqua ad alta portanza (21kg/mc) di produzione Lareg2 Srl con codice 21SD, box perimetrale intorno al molleggio di poliuretano schiumato ad acqua ad alta densità (25kg/mc) di produzione Vittorio Brogginì Srl con codice T25D. Altezza totale 26cm. Fodera sfoderabile bordata con 4 maniglie climatizzata (imbottitura misto lana per la parte invernale e misto cotone per la parte estiva) e strato di memory foam da 1,5cm nella parte invernale.         </td> </tr> </table>	VARIANTE UNICA	Materasso cinque strati con uno strato di base alto 2cm di poliuretano schiumato ad acqua ad alta portanza (21 kg/mc) di produzione Lareg2 Srl con codice 21SD, accoppiato a uno strato di feltro prodotto da Manifattura Maiano da 1cm, accoppiato a un box di molle Bonnel ad alta densità (650 molle nella misura matrimoniale) alto 14cm di produzione Antecon Srl, accoppiato a uno strato di feltro prodotto da Manifattura Maiano da 1cm, infine accoppiata a uno strato alto 2cm di poliuretano schiumato ad acqua ad alta portanza (21kg/mc) di produzione Lareg2 Srl con codice 21SD, box perimetrale intorno al molleggio di poliuretano schiumato ad acqua ad alta densità (25kg/mc) di produzione Vittorio Brogginì Srl con codice T25D. Altezza totale 26cm. Fodera sfoderabile bordata con 4 maniglie climatizzata (imbottitura misto lana per la parte invernale e misto cotone per la parte estiva) e strato di memory foam da 1,5cm nella parte invernale.
VARIANTE UNICA	Materasso cinque strati con uno strato di base alto 2cm di poliuretano schiumato ad acqua ad alta portanza (21 kg/mc) di produzione Lareg2 Srl con codice 21SD, accoppiato a uno strato di feltro prodotto da Manifattura Maiano da 1cm, accoppiato a un box di molle Bonnel ad alta densità (650 molle nella misura matrimoniale) alto 14cm di produzione Antecon Srl, accoppiato a uno strato di feltro prodotto da Manifattura Maiano da 1cm, infine accoppiata a uno strato alto 2cm di poliuretano schiumato ad acqua ad alta portanza (21kg/mc) di produzione Lareg2 Srl con codice 21SD, box perimetrale intorno al molleggio di poliuretano schiumato ad acqua ad alta densità (25kg/mc) di produzione Vittorio Brogginì Srl con codice T25D. Altezza totale 26cm. Fodera sfoderabile bordata con 4 maniglie climatizzata (imbottitura misto lana per la parte invernale e misto cotone per la parte estiva) e strato di memory foam da 1,5cm nella parte invernale.		
Destinazione d'uso/intendet use	Materasso ortopedico/ / Orthopedic mattress/		
Classificazione 2017/745/CEE, Allegato VIII punto 4 Classification according to 2017/745/EEC, annex VIII number 4	Classe I, per la regola 1/ class I per rule 1		
Altre classificazioni/other classing	N.A.		
Ente notificato/Notified body	N.A.		
Numero certificato/certificate number	N.A.		
Procedura di certificazioni in accordo con 2017/745/CEE/Procedure according to 2017/745/EEC	Allegato II, Allegato III/Annex II, Annex III		
Numero di registrazione/NSIS number	2392911		
Codice GMDN/GMDN code	47520		

**Lordflex's s.r.l.**  
Sede Legale, Uffici e Stabilimento  
Via Carrara, 11 (s.p. 360 Km. 23)  
60030 SERRA DE' CONTI (AN)  
tel. 0731 879466/7 fax 0731 878155  
www.lordflex.com info@lordflex.com  
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.  
C.C.I.A.A. - Ancona REA 68020  
Reg. Imprese AN - Cod. Fisc./P.Iva 00190580423  
European Vat Identification Cod. IT00190580423



Codice CND/CND code	Y0899
Codice Udi-Di di base	UDI DI: 111872855877; BASIC UDI: PP130621013393
Norme armonizzate/Harmonized standards	Regolamento 2017/745/CEE/, EN 12182, EN 14971, Regolamento UE 1007/2011, UNI EN 14971, UNI EN 1957/2001, UNI EN 10707
Altre norme applicate/Other standards	Altre

Il fabbricante dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto descritto sopra è in accordo con il regolamento 2017/745/CEE e successive modificazioni

We declare under sole responsibility that the products described above are in compliance with regulation 2017/745/EEC.

Serra De' Conti (AN ), 20/03/2023

Lordflex's Srl

Il titolare

**Perfetto 850**  
**Perfetto 1700**  
**Perfetto AP**

**materassi ortopedici ed ergonomici**

**Manuale d'uso**

 Lordflex's Srl  
Via Carrara 11  
60030 Serra de Conti (AN)



Perfetto 850  
Perfetto 1700  
Perfetto AP

*Gentile Cliente,*

*La ringraziamo per la preferenza riservata al ns. materasso e ci auguriamo che essa possa rispondere alle Sue aspettative.*

Come cliente Lordflex's Srl Lei ha ora il privilegio di avere in ogni momento uno staff di tecnici specializzati a Sua completa disposizione.

*Per ogni Sua esigenza non esiti a contattarci con i mezzi che riterrà più idonei e opportuni; al fine di rendere più esaurienti le nostre risposte La preghiamo di citare sempre il modello ed il numero di matricola del Suo materasso.*

*La invitiamo a seguire scrupolosamente le indicazioni riportate nel presente manuale, questo Le sarà di valido aiuto per l'utilizzo ottimale e per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche della Suo materasso.*

*Cordialmente Le auguriamo buon riposo.*

Perfetto 850  
Perfetto 1700  
Perfetto AP

## Manuale Utente

### INDICE

1. AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA .....	4
3. SIMBOLI UTILIZZATI .....	4
4. DESCRIZIONE DEL MATERASSO .....	5
5. INSTALLAZIONE E USO .....	5
6. ETICHETTE .....	6
L'etichetta è apposta nella posizione indicata in figura:.....	6
7. PULIZIA .....	7
8. SMALTIMENTO .....	7
9. GARANZIA.....	7

Perfetto 850  
Perfetto 1700  
Perfetto AP

## 1. AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

PRIMA DI PROCEDERE ALL'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE E LE SEGUENTI AVVERTENZE E PRECAUZIONI



- Evitare l'esposizione a fonti di calore eccessive.
- Maneggiare con cura.
- Utilizzare il presente dispositivo soltanto in conformità alla sua destinazione d'uso, prevenzione delle piaghe da decubito e trattamento degli stati dolorosi alla schiena e alla cervicale dovuti alla postura.
- Qualsiasi manipolazione, sostituzione, intervento sul dispositivo non effettuato da personale autorizzato Lordflex's comporta la decadenza della garanzia e la non responsabilità del costruttore per danni a persone o cose che possono derivarne;
- Rimuovere la fodera di rivestimento del materasso soltanto per operazioni di pulizia/disinfezione dello stesso.

## 2. DESTINAZIONE D'USO

Il materasso oggetto del presente manuale di istruzioni ha caratteristiche ortopediche ed è pertanto particolarmente indirizzato a utilizzatori con stati dolorosi o patologici a livello ortopedico, nonché per il riposo e la degenza di pazienti.

## 3. SIMBOLI UTILIZZATI

Nel presente manuale sono utilizzati simboli per richiamare l'attenzione dell'utente su informazioni ed osservazioni di particolare importanza, i simboli sono i seguenti:



Simbolo di Fabbricante del dispositivo medico



Conformità rispetto al regolamento comunitario 2017/745/CE sui dispositivi medici

Perfetto 850  
Perfetto 1700  
Perfetto AP

#### **4. DESCRIZIONE DEL MATERASSO**

##### **4.1 CARATTERISTICHE GENERALI**

Perfetto 850, Perfetto 1700 e Perfetto AP sono materassi ortopedici destinati a utilizzatori con problematiche della colonna vertebrale o comunque ortopediche e sono anche adatti per il riposo e la degenza di pazienti (non avendo comunque capacità antidecubito). Essi sono realizzati in molle insacchettate indipendenti (Perfetto 850 e Perfetto 1700) o molle Bonnel (Perfetto AP) e espansi flessibili. Sono particolarmente studiati per il mantenimento della portanza e elasticità nel tempo oltre che per assicurare il comfort dell'utilizzatore. L'anima dei dispositivi è composta da molle insacchettate e poliuretano espanso flessibile (Perfetto 850, con 850 molle insacchettate nella misura matrimoniale e Perfetto 1700 con 1.700 molle insacchettate nella misura matrimoniale) oppure da molle Bonnel e poliuretano espanso flessibile (Perfetto AP) assemblati insieme per formare un unico dispositivo.

I materassi sono fabbricati nelle seguenti dimensioni:

Larghezza da cm 80 a cm 180

Lunghezza da cm 190 a cm 200

Incremento della misura pari a 5 cm

Sono disponibili realizzazioni fuori misura su richiesta.

#### **5. INSTALLAZIONE E USO**

L'installazione del materasso è estremamente semplice. Una volta ricevuto, togliere l'imballo, verificare l'integrità e posizionare il materasso sopra alla rete del letto.

Per un corretto uso del materasso occorre utilizzarlo come indicato nell'etichetta e ruotarlo in base alla stagione (lato estivo - lato invernale).

Perfetto 850  
Perfetto 1700  
Perfetto AP

## 6. ETICHETTE

Il materasso è identificato dalla seguente etichetta posizionata sopra al materasso stesso.

 **Lordflex's**  
**Via Carrara 11**  
**60030 Serra de Conti (AN)**  
**Modello: Perfetto 850**  
**Anno di produzione:**  
**Numero di serie:**  
**Dimensione:**  
**Condizioni di conservazione:**  
Temperatura: +15°C ÷ 35°C  
Umidità relativa: 45 ÷ 75 %



 **Lordflex's**  
**Via Carrara 11**  
**60030 Serra de Conti (AN)**  
**Modello: Perfetto 1700**  
**Anno di produzione:**  
**Numero di serie:**  
**Dimensione:**  
**Condizioni di conservazione:**  
Temperatura: +15°C ÷ 35°C  
Umidità relativa: 45 ÷ 75 %



 **Lordflex's**  
**Via Carrara 11**  
**60030 Serra de Conti (AN)**  
**Modello: Perfetto AP**  
**Anno di produzione:**  
**Numero di serie:**  
**Dimensione:**  
**Condizioni di conservazione:**  
Temperatura: +15°C ÷ 35°C  
Umidità relativa: 45 ÷ 75 %



L'etichetta è apposta nella posizione indicata in figura:





Perfetto 850  
Perfetto 1700  
Perfetto AP

## **7. PULIZIA**

Ad intervalli regolari pulite e disinfettate il materasso. Non immergete il materasso in acqua.  
In caso di uso in ambito ospedaliero/clinico disinfettare e igienizzare il materasso ad ogni cambio paziente. Pulizia della fodera di rivestimento come da indicazioni riportate in etichetta prodotto

## **8. SMALTIMENTO**

Smaltire il prodotto con i rifiuti urbani e secondo la norma vigente nel proprio comune di residenza.

## **9. GARANZIA**

La Lordflex's garantisce il materasso contro difetti di materiale e di produzione per un periodo di 24 mesi dalla consegna

Nota: ogni tentativo di riparazione, ripristino o modifica del materasso, che esuli da quanto contemplato nel manuale utente, da parte di persona non autorizzata dalla Lordflex's, farà decadere la garanzia.

Per richiedere l'intervento in garanzia, l'acquirente, immediatamente dopo il rilevamento dell'evento riguardante il reclamo, dovrà contattare la Lordflex's per iscritto o telefonicamente. In nessun caso la Lordflex's sarà responsabile di danni diretti, indiretti, a persone animali od oggetti causati da incuria da parte del cliente.